


Anlegetechniken

Vorlagen

Formen Sie die Vorlage zu einer Schale.

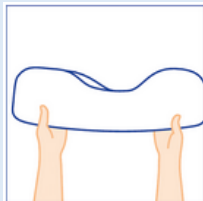

Legen Sie nun die Vorlage von vorne nach hinten zwischen die Beine.



Passen Sie die Vorlage am Gesäß an.



Nun fixieren Sie die Vorlage vorne und ziehen die Netzhose vorsichtig hoch.




Passen Sie die Vorlage, als auch Netzhose in der Leistengegend an.



Windelhosen

Formen Sie die Windelhose zu einer Schale.

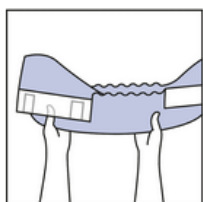

Legen Sie die Windelhose von vorne nach hinten zwischen die Beine und falten die Vorderseite glatt.



Nun passen Sie die Rückseite an und fixieren diese mit einer Hand.



Fixieren Sie die Vorderseite und schließen Sie nun zunächst die beiden unteren Klettverschlüsse.



Danach schließen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen etwas daran, um sie im Gewebe der Windelhose zu fixieren.



Die Klettverschlüsse können wiederholt angepasst und geöffnet werden.

Einlagen

Entfernen Sie den Klebestreifen auf der Rückseite und formen Sie diese zu einer Schalenform.



Legen Sie die Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose.



Ziehen Sie die Hose hoch und fixieren Sie die Einlage.



Pants

Ziehen Sie die Pants wie normale Unterhosen nach oben über die Beine.



Zum Ausziehen und Wechsel der Pants können Sie die Seitennähte nutzen, um diese aufzureißen.



Dank der freundlichen Genehmigung der Paul Hartmann AG und Lille Healthcare GmbH können wir Ihnen die Anlegetechnik für die Vorlagen, Windelhosen, Einlagen und Pants präsentieren.